


AMBIC®

Brunsterkennung

Seit vielen Jahren geht die Herdenfruchtbarkeit zurück, und das kostet die Milchviehhalter Tausende von Euro jedes Jahr wegen sinkender Herdenleistung. Mehr denn je hängt heute die Rentabilität der Milchviehhaltung davon ab, dass die Kühe so schnell wie möglich nach dem Abkalben wieder trächtig werden.

Die Bedeutung zuverlässiger Brunsterkennung für die Herdenfruchtbarkeit kann gar nicht unterschätzt werden. Kühe, deren Brunstverhalten nicht erkannt wird, können nicht besamt, also auch nicht trächtig werden!

Je mehr Kühe zum richtigen Zeitpunkt besamt werden, desto mehr Kühe werden auch trächtig. Wenn Sie also den Prozentsatz erkannter Brunste z.B. von 40 % auf 60 % erhöhen, erhöht sich auch die Anzahl trächtiger Kühe in einem gegebenen Zeitraum um 50 %.

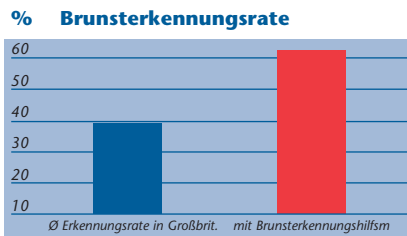

Einer der zuverlässigsten Hinweise darauf, dass eine Kuh brünstig ist, ist der Nachweis ihres Brunstverhaltens. **ΔiALERT**-Brunsterkennungskapseln verkürzen die Zeit, die Sie zur Herdenbeobachtung aufwenden müssen, und erhöhen deutlich die Anzahl der Kühe, bei denen Brunstverhalten festgestellt wird.

IHR AMBIC-HÄNDLER:



SHEET No. AA6402 01.06.08

Ambic Equipment Limited
Avenue Four, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4XT. Großbritannien
Tel: +44 (0) 1993 701936/7
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk



ISO 9001
FM 09784

© Ambic Equipment Limited 01.06.08

AMBIC®

... für den Milchviehhalter von heute

ΔiALERT™

SELBSTHAFTENDE BRUNSTERKENNUNGSKAPSELN



- **Selbsthaftend - kein Hantieren mit Klebstoff nötig**
- **Einfach anzubringen, bloß abziehen und aufkleben**
- **Große Oberfläche, bessere Haftung**
- **Einzigartige PVC-Verarbeitung, passt sich der Körperform der Kuh an, erreicht so sichereren Sitz**
- **Geeignet für Milchvieh- und Fleischviehbesamung**
- **Anwenderfreundlich**
BLOSS VORBEREITEN | ABZIEHEN | AUFKLEBEN!

Besuchen Sie uns im Internet: www.ambic.co.uk

leading best practice in livestock health management

Δi ALERT -Funktionsweise

Δi ALERT ist ein einfaches, selbsthaftendes Hilfsmittel, das sich leicht an der Kuh anbringen lässt und dann optisch meldet, dass bei der Kuh Brunstverhalten einsetzt.

Δi ALERT-Brunsterkennungskapseln haben eine druckempfindliche Kapsel, die aktiviert wird, wenn andere Kühe in der Herde die brünstige Kuh bespringen.

Die **Δi ALERT** Kapseln verfügen über eine integrierte Auslöseverzögerung, die dafür sorgt, dass der Aufsprung mindestens etwa 3 Sekunden gedauert haben muss, damit die Kapsel aktiviert wird.

Durch diese Verzögerung kann zwischen echter Empfängnisbereitschaft und Bespringen aus anderen Gründen unterschieden werden. Damit wird „falscher Alarm“ verhindert.



Bestellhinweise

Erhältlich in 10er- und 40er-Packs

Art.No. Anz. **Δi ALERT**

AA/010 10

AA/040 40

AR/001 Ersatzreinigungstuch



Δi ALERT -Anwendung

Vorbereitung des Tierbereichs

Entfernen Sie alle Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so die **Δi ALERT**-Kapsel aktivieren oder abreißen könnte.

Anwärmen der **Δi ALERT**

Wärmen Sie den Streifen auf Körpertemperatur. So erzielen Sie optimale Haftung.

Vorbereitung der Anbringungsstelle

Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Haare mit dem mitgelieferten **Δi ALERT**-Reinigungstuch. Wenn der Bereich sehr schmutzig ist oder das Fell dort verfilzt ist, striegeln Sie erst ab, bevor Sie das **Δi ALERT**-Tuch verwenden. Bürsten Sie aber nicht zu kräftig durch, da dadurch der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört wird, was die Haftigenschaften verschlechtert. Bringen Sie die Kapsel nur auf trockenem Fell an, niemals bei Nässe.



Wahl der richtigen Stelle

Ziehen Sie den Schutzfilm ab und bringen Sie die **Δi ALERT**-Kapsel auf dem Rücken der Kuh an, und zwar vor der Kruppe, auf Höhe der Hüfte am Schwanzansatz, wie auf der Abbildung. In diesem Bereich übt der Bug der springenden Kuh am meisten Druck aus und löst die **Δi ALERT**-Kapsel aus. Haftung und Erkennungsleistung sind nur bei Anbringung an der richtigen Stelle optimal.



Anbringung der **Δi ALERT**

Drücken Sie die **Δi ALERT**-Brunsterkennungskapsel fest auf das Fell des Tiers, indem Sie mit den Fingern den gesamten Haftbereich feststreichen. Üben Sie dabei aber keinen Druck auf die Kapsel selbst aus, da Sie sie sonst aktivieren könnten.

Wahl des richtigen Zeitpunkts

Bringen Sie die **Δi ALERT**-Kapsel 25 Tage nach Abkalben an. Sollte die Kapsel auch 14 Tage später noch nicht ausgelöst haben, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Die **Δi ALERT**-Kapseln können auch nach der Besamung eingesetzt werden, um Tiere zu erkennen, die nach drei Wochen wieder brünstig werden.

