

AMBIC®

Fill 'n' Dip™

Dippbecher-Tankstelle



- Schnelles, sicheres und einfaches Befüllen von Dippbechern
- Schluss mit Verschütten und Vergeudung von Dippmitteln
- Möglichkeit zur Direktabgabe aus dem Kanister oder Lagertank
- Rasche und einfache Montage
- Mehrere Spenderstationen als Option

leading best practice in livestock health management

AMBIC®


Das **Fill'n'Dip™** System



- Das Fill 'n' Dip™-System ist dafür gedacht, Ihnen das Befüllen von Dippbechern zu erleichtern, damit es schnell und sicher von der Hand geht. Sie brauchen nicht mehr am Dippmittelkanister hantieren und vermeiden so Überschwappen und unnötige Vergeudung. Außerdem kann Dippmittel direkt aus einem Lagertank abgegeben werden.
- Zum System gehört ein druckluftbetriebener Pumpen- und Steuerkasten, der Dippmittel aus dem Kanister ansaugt und zu einem oder mehreren Spendern pumpt, die bequem erreichbar im oder in der Nähe des Melkstands montiert sind.
- Um einen Dippbecher zu befüllen, muss er nur unter den Fill 'n' Dip™-Spender gehalten und dann gegen den Spenderstutzen gedrückt werden, bis der Becher voll ist.
- Das Befüllen dauert nur einige Augenblicke, wenn ein normales Dippmittel verwendet wird. Dickflüssigere Barrieredipps brauchen etwas länger.

AMBIC®

Technische Daten des **Fill'n'Dip™**

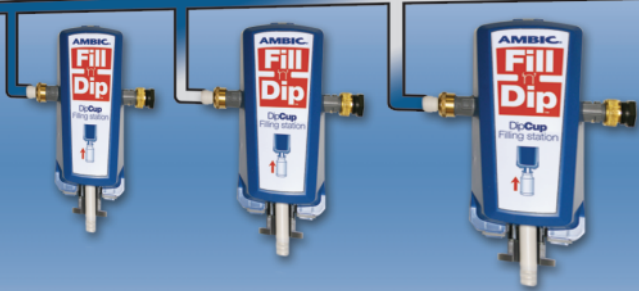

- Das System erfordert eine Druckluftversorgung von 3 - 5 bar (40 - 80 psi), die einen Luftfluss von 20 l/min (0,75 cfm) liefern kann.
- Zum Lieferumfang gehören 15 m (50 Fuß) LDPE-Leitung \varnothing 3/8" (9,5 mm) als Zuleitung zu den Spendern.
- Bauartbedingt ist der Spender zur Montage mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer senkrechten, planen Fläche gedacht.
- Zusätzliche Spender können von demselben Pumpen- und Steuerkasten bedient werden (je nach Länge der Zuleitung; vgl. die Betriebsanleitung).
- Das System ist für die Verwendung aller anerkannten Zitzendippmittel mit niedriger und mittlerer Viskosität geeignet, mit Ausnahme von Natriumhypochlorit und Peressigsäure (jedoch kann es sich bei einigen sehr dickflüssigen Dippmitteln als ungeeignet erweisen; vgl. die Betriebsanleitung).

... über Ambic

Ambic gehört weltweit zu den führenden Spezialisten bei der Entwicklung und Fertigung eines umfassenden Produktprogramms für Hygiene in der Milchviehhaltung und Tiergesundheitsvorsorge, das rund um den Globus geschätzt wird. Insbesondere ist Ambic der weltweit führende Lieferant von Mastitisvorbeugungs- und -erkennungsausrüstung, wo die Spitzenposition am Markt auf fast 30 Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit, innovativen Produktkonzepten, hochwertiger Fertigung und vorbildlichem Kundendienst beruht.

Bestellhinweise

AFD/1000	Pumpenkasten mit einem Spender
AFD/1002	Pumpenkasten mit zwei Spendern
AFD/1005	Dichtungssatz für Spender
AFD/1006	Erweiterungssatz Spender, mit T-Stück
AFD/1007	Spender separat
AFD/1008	T-Stück für Spender separat
AFD/1009	Leitungsverlängerung für Erweiterungssatz (15 m/50 Fuß)

Ihr Ambic-Händler



SHEET No. FND6404 30.04.09

Ambic Equipment Limited
Avenue Four, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4XT. England
Tel: +44 (0) 1993 701936/7
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk



ISO 9001
FM 09784

© Ambic Equipment Limited 30.04.09

Besuchen Sie uns im Internet: www.ambic.co.uk